

ÁCIDO ÚRICO ENZIMÁTICO

CÓDIGO	VOLUME (ML)	Nº. TESTES
100/100-100	100	500
100/100-200	200	1000

GERAL

NOME  MARCA  TIPO

C.O. PRIMÁRIO  C.O. BICROMÁTICO  UNIDADE  DECIMAL

DISPENSADO

VOL. AMOSTRA  R1 VOLUME  R2 VOLUME  T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE

ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE

ABS. MIN.  ABS. MÁX  INTERVALO DE VERIFICAÇÃO

FATOR

<input type="text"/>	MÉTODO DECRESCENTE	CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR	<input type="text" value="*"/>
<input type="text"/>	FATOR	INTERPOLAÇÃO	<input type="text" value="LINEAR"/>
<input type="text" value="X"/>	CALIBRADOR		

VALORES DE REFERÊNCIA

ESPECIAIS

OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO

T. BRANCO DE REAGENTE	<input type="text" value="600 SEG"/>	INTERVALOS DE BRANCO	<input type="text" value="72 H"/>
T. INCUBAÇÃO	<input type="text" value="600 SEG"/>	LIMITE LINEAR	<input type="text" value="20"/>
REPETIÇÃO	<input type="text" value="1.5"/>		

AVANÇADAS

GAP AR INICIAL	<input type="text" value="2 µL"/>	DILUIÇÃO COM:	<input type="text" value="AMOSTRA"/>	LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA	<input type="text" value="0"/>
VELOCIDADE GAP INICIAL	<input type="text" value="500"/>			LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA	<input type="text" value="0"/>
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	<input type="text" value="2 µL"/>			MÉTODO	LAVAGENS
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	<input type="text" value="500"/>	VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO	<input type="text" value="2 µL"/>		
VEL. DE ASPERAÇÃO R1+AMOSTRA	<input type="text" value="2500"/>				
R2 VEL. DESPENÇÃO	<input type="text" value="2500"/>				
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	<input type="text" value="2000"/>	VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA	<input type="text" value="500"/>		
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	<input type="text" value="2000"/>				

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

ALBUMINA

CÓDIGO	VOLUME (ML)	Nº. TESTES
100/110-200	200	666

GERAL

NOME	ALBUMINA	MARCA	VIDA	TIPO	PONTO FINAL BRANCO DE REAGENTE		
C.O. PRIMÁRIO	600 NM	C.O. BICROMÁTICO	-	UNIDADE	g/dL	DECIMAL	2

DISPENSADO

VOL. AMOSTRA	2 µL	R1 VOLUME	300 µL	R2 VOLUME	-	T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE	0 SEG
--------------	------	-----------	--------	-----------	---	----------------------------	-------

ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE

ABS. MIN.	-0.5	ABS. MÁX	2.5	INTERVALO DE VERIFICAÇÃO	#
-----------	------	----------	-----	--------------------------	---

FATOR

MÉTODO DECRESCENTE		CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR	*
FATOR		INTERPOLAÇÃO	LINEAR
X	CALIBRADOR		

VALORES DE REFERÊNCIA

#
---

ESPECIAIS

OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO	
T. BRANCO DE REAGENTE	300 SEG
T. INCUBAÇÃO	300 SEG
REPETIÇÃO	1.5

INTERVALOS DE BRANCO	72 H
----------------------	------

LIMITE LINEAR	6
---------------	---

AVANÇADAS

GAP AR INICIAL	2 µL
VELOCIDADE GAP INICIAL	500
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	2 µL
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	500
VEL. DE ASPERAÇÃO R1+AMOSTRA	2500
R2 VEL. DESPENÇÃO	2500
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000

DILUIÇÃO COM:

AMOSTRA	
VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO	2 µL
VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA	500

LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA

LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA	3
MÉTODO	
LAVAGENS	

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

ALFA-1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA

CÓDIGO	VOLUME (ML)	Nº. TESTES
100/120-050	50	250
100/120-100	100	500

GERAL

NOME	ALFA-1-GLICO	MARCA	VIDA	TIPO	PONTO FINAL BRANCO DE REAGENTE		
C.O. PRIMÁRIO	340 NM	C.O. BICROMÁTICO	-	UNIDADE	mg/dL	DECIMAL	1

DISPENSADO

VOL. AMOSTRA	2 µL	R1 VOLUME	200 µL	R2 VOLUME	-	T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE	0 SEG
--------------	------	-----------	--------	-----------	---	----------------------------	-------

ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE

ABS. MIN.	-0.5	ABS. MÁX	2.5	INTERVALO DE VERIFICAÇÃO	#
-----------	------	----------	-----	--------------------------	---

FATOR

MÉTODO DECRESCENTE		CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR	*
FATOR		INTERPOLAÇÃO	LINEAR
X	CALIBRADOR		

VALORES DE REFERÊNCIA

#
---

ESPECIAIS

OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO

T. BRANCO DE REAGENTE	600 SEG
T. INCUBAÇÃO	600 SEG
REPETIÇÃO	1.5

INTERVALOS DE BRANCO	72 H
----------------------	------

LIMITE LINEAR	150
---------------	-----

AVANÇADAS

GAP AR INICIAL	2 µL
VELOCIDADE GAP INICIAL	500
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	2 µL
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	500
VEL. DE ASPERAÇÃO R1+AMOSTRA	2500
R2 VEL. DESPENÇÃO	2500
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000

DILUIÇÃO COM:

AMOSTRA	
VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO	2 µL
VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA	500

LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA

LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA	0
MÉTODO	LAVAGENS

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

**ALFA AMILASE**

<b>CÓDIGO</b>	<b>VOLUME (ML)</b>	<b>Nº. TESTES</b>
100/130-060	60	300

**GERAL**

NOME	MARCA	TIPO
ALFA AMILASE	VIDA	CINÉTICA
C.O. PRIMÁRIO	C.O. BICROMÁTICO	UNIDADE
405 NM	-	U/L
		DECIMAL
		0

**DISPENSADO**

VOL. AMOSTRA	R1 VOLUME	R2 VOLUME	T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE
2 µL	200 µL	-	0

**ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE**

ABS. MIN.	ABS. MÁX	INTERVALO DE VERIFICAÇÃO
-0.5	2.5	#

**FATOR**

MÉTODO DECRESCENTE	CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR
FATOR	*
X CALIBRADOR	INTERPOLAÇÃO
	LINEAR

**VALORES DE REFERÊNCIA**

#

**ESPECIAIS**

OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO

T. INICIAL DA LEITURA	60 SEG
CONSUMO INICIAL	0.22
REPETIÇÃO	1.5

T. FINAL DA LEITURA	180 SEG	T. BDT	20
LINEARIDADE	0.9		
LIMITE LINEAR	2000	Nº DE LEITURAS	4

**AVANÇADAS**

GAP AR INICIAL	2 µL
VELOCIDADE GAP INICIAL	500
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	2 µL
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	500
VEL. DE ASPIRAÇÃO R1+AMOSTRA	2500
R2 VEL. DESPENÇÃO	2500
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000

**DILUIÇÃO COM:**

AMOSTRA	
VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO	2 µL
VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA	500

**LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA**

LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA	0
MÉTODO	LAVAGENS

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

**Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.**

**Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.**

ASO TURBIDIMÉTRICO

CÓDIGO	VOLUME (ML)	Nº. TESTES
700/110-050	050	250
700/110-100	100	500

GERAL

NOME  MARCA  TIPO

C.O. PRIMÁRIO  C.O. BICROMÁTICO  UNIDADE  DECIMAL

DISPENSADO

VOL. AMOSTRA  R1 VOLUME  R2 VOLUME  T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE

ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE

ABS. MIN.  ABS. MÁX  INTERVALO DE VERIFICAÇÃO

FATOR

<input type="text"/>	MÉTODO DECRESCENTE	CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR	<input type="text" value="*"/>
<input type="text"/>	FATOR	INTERPOLAÇÃO	<input type="text" value="LINEAR"/>
<input type="text" value="X"/>	CALIBRADOR		

VALORES DE REFERÊNCIA

ESPECIAIS

OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO

T. BRANCO DE REAGENTE

T. INCUBAÇÃO

REPETIÇÃO

INTERVALOS DE BRANCO

LIMITE LINEAR

AVANÇADAS

GAP AR INICIAL	<input type="text" value="0 µL"/>
VELOCIDADE GAP INICIAL	<input type="text" value="500"/>
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	<input type="text" value="2 µL"/>
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	<input type="text" value="500"/>
VEL. DE ASPERAÇÃO R1+AMOSTRA	<input type="text" value="2500"/>
R2 VEL. DESPENÇÃO	<input type="text" value="2500"/>
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	<input type="text" value="2000"/>
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	<input type="text" value="2000"/>

DILUIÇÃO COM:

VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO

VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA

LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA

LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA

MÉTODO	LAVAGENS

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

**BILIRRUBINA DIRETA**

<b>CÓDIGO.</b>	<b>VOLUME (ML)</b>	<b>Nº. TESTES</b>
100/150-100	100	333

**GERAL**

NOME	MARCA	TIPO
BIL DIRETA	VIDA	PONTO FINAL BRANCO DE AMOSTRA
C.O. PRIMÁRIO	C.O. BICROMÁTICO	UNIDADE
546 NM	-	mg/dL
		DECIMAL
		2

**DISPENSADO**

VOL. AMOSTRA	R1 VOLUME	R2 VOLUME	T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE 2
15 µL	300 µL	10 µL	300 SEG

**ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE**

ABS. MIN.	ABS. MÁX	INTERVALO DE VERIFICAÇÃO
-0.5	2.5	#

**FATOR**

MÉTODO DECRESCENTE	CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR
FATOR	*
X CALIBRADOR	INTERPOLAÇÃO
	LINEAR

**VALORES DE REFERÊNCIA**

#
---

**ESPECIAIS**

OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO	INTERVALOS DE BRANCO
T. REAGENTE 1 + AMOSTRA	72 H
T. INCUBAÇÃO	LIMITE LINEAR
REPETIÇÃO	15

**AVANÇADAS**

GAP AR INICIAL	0 µL	DILUIÇÃO COM:	LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA
VELOCIDADE GAP INICIAL	500	AMOSTRA	LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	2 µL		3
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	500	VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO	
VEL. DE ASPERAÇÃO R1+AMOSTRA	2500	6 µL	
R2 VEL. DESPENÇÃO	2500		
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000	VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA	
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000	500	

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

**BILIRRUBINA TOTAL**

<b>CÓDIGO.</b>	<b>VOLUME (ML)</b>	<b>Nº. TESTES</b>
100/160-100	100	333

**GERAL**

NOME	MARCA	TIPO
BIL TOTAL	VIDA	PONTO FINAL BRANCO DE AMOSTRA
C.O. PRIMÁRIO	546 NM	C.O. BICROMÁTICO
	-	UNIDADE
		mg/dL
		DECIMAL
		2

**DISPENSADO**

VOL. AMOSTRA	15 µL	R1 VOLUME	300 µL	R2 VOLUME	10 µL	T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE	300 SEG
--------------	-------	-----------	--------	-----------	-------	----------------------------	---------

**ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE**

ABS. MIN.	-0.5	ABS. MÁX	2.5	INTERVALO DE VERIFICAÇÃO	#
-----------	------	----------	-----	--------------------------	---

**FATOR**

MÉTODO DECRESCENTE	CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR	*
FATOR	INTERPOLAÇÃO	LINEAR
X	CALIBRADOR	

**VALORES DE REFERÊNCIA**

#
---

**ESPECIAIS**

OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO		INTERVALOS DE BRANCO	72 H
T. BRANCO DE REAGENTE	300 SEG	LIMITE LINEAR	15
T. INCUBAÇÃO	300 SEG		
REPETIÇÃO	1.5		

**AVANÇADAS**

GAP AR INICIAL	0 µL	DILUIÇÃO COM:		<b>LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA</b>
VELOCIDADE GAP INICIAL	500	AMOSTRA		LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	2 µL			3
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	500	VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO		
VEL. DE ASPERAÇÃO R1+AMOSTRA	2500	2 µL		
R2 VEL. DESPENÇÃO	2500			
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000	VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA		
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000	500		

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

**CÁLCIO ARSENAZO**

<b>CÓDIGO.</b>	<b>VOLUME (ML)</b>	<b>Nº. TESTES</b>
100/190-100	100	500

**GERAL**

NOME	CALCIO ARS	MARCA	VIDA	TIPO	PONTO FINAL BRANCO DE REAGENTE		
C.O. PRIMÁRIO	650 NM	C.O. BICROMÁTICO	-	UNIDADE	mg/dL	DECIMAL	2

**DISPENSADO**

VOL. AMOSTRA	2 µL	R1 VOLUME	200 µL	R2 VOLUME	-	T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE	0 SEG
--------------	------	-----------	--------	-----------	---	----------------------------	-------

**ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE**

ABS. MIN.	-0.5	ABS. MÁX	2.5	INTERVALO DE VERIFICAÇÃO	#
-----------	------	----------	-----	--------------------------	---

**FATOR**

MÉTODO DECRESCENTE		CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR	*
FATOR		INTERPOLAÇÃO	LINEAR
X	CALIBRADOR		

**VALORES DE REFERÊNCIA**

#
---

**ESPECIAIS**

OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO	
T. BRANCO DE REAGENTE	300 SEG
T. INCUBAÇÃO	300 SEG
REPETIÇÃO	1.5

INTERVALOS DE BRANCO	72 H
----------------------	------

LIMITE LINEAR	20
---------------	----

**AVANÇADAS**

GAP AR INICIAL	2 µL
VELOCIDADE GAP INICIAL	500
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	2 µL
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	500
VEL. DE ASPERAÇÃO R1+AMOSTRA	2500
R2 VEL. DESPENÇÃO	2500
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000

**DILUIÇÃO COM:**

AMOSTRA	
VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO	2 µL
VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA	500

**LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA**

LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA	3
MÉTODO	
LAVAGENS	

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

**Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.**

**Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.**



CK MB

CÓDIGO	VOLUME (ML)	Nº. TESTES
100/220-050	50	250
100/220-100	100	500

GERAL

NOME  MARCA  TIPO

C.O. PRIMÁRIO  C.O. BICROMÁTICO  UNIDADE  DECIMAL

DISPENSADO

VOL. AMOSTRA  R1 VOLUME  R2 VOLUME  T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE

ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE

ABS. MIN.  ABS. MÁX  INTERVALO DE VERIFICAÇÃO

FATOR

<input type="checkbox"/>	MÉTODO DECRESCENTE	CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR	<input type="text" value="*"/>
<input type="checkbox"/>	FATOR	INTERPOLAÇÃO	<input type="text" value="LINEAR"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	CALIBRADOR		

VALORES DE REFERÊNCIA

ESPECIAIS

OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO

T. INICIAL DA LEITURA	<input type="text" value="180 SEG"/>	T. FINAL DA LEITURA	<input type="text" value="180 SEG"/>	T. BDT	<input type="text" value="20"/>
CONSUMO INICIAL	<input type="text" value="0.22"/>	LINEARIDADE	<input type="text" value="0.9"/>	Nº DE LEITURAS	<input type="text" value="4"/>
REPETIÇÃO	<input type="text" value="1.5"/>	LIMITE LINEAR	<input type="text" value="600"/>		

AVANÇADAS

GAP AR INICIAL	<input type="text" value="2 µL"/>
VELOCIDADE GAP INICIAL	<input type="text" value="500"/>
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	<input type="text" value="2 µL"/>
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	<input type="text" value="500"/>
VEL. DE ASPIRAÇÃO R1+AMOSTRA	<input type="text" value="2500"/>
R2 VEL. DESPENÇÃO	<input type="text" value="2500"/>
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	<input type="text" value="2000"/>
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	<input type="text" value="2000"/>

DILUIÇÃO COM:

AMOSTRA

VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO

VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA

LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA

LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA

MÉTODO	LAVAGENS
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

CK TOTAL

CÓDIGO	VOLUME (ML)	Nº. TESTES
100/230-050	50	200
100/230-100	100	400

GERAL

NOME	CK T	MARCA	VIDA	TIPO	CINÉTICA		
C.O. PRIMÁRIO	340 NM	C.O. BICROMÁTICO	-	UNIDADE	U/L	DECIMAL	1

DISPENSADO

VOL. AMOSTRA	4 µL	R1 VOLUME	160 µL	R2 VOLUME	40 µL	T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE	0 SEG
--------------	------	-----------	--------	-----------	-------	----------------------------	-------

ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE

ABS. MIN.	-0.5	ABS. MÁX	2.5	INTERVALO DE VERIFICAÇÃO	#
-----------	------	----------	-----	--------------------------	---

FATOR

MÉTODO DECRESCENTE		CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR	*
FATOR		INTERPOLAÇÃO	LINEAR
X	CALIBRADOR		

VALORES DE REFERÊNCIA

#
---

ESPECIAIS

OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO

T. INICIAL DA LEITURA	120 SEG
CONSUMO INICIAL	0.22
REPETIÇÃO	1.5

T. FINAL DA LEITURA	180 SEG	T. BDT	20
LINEARIDADE	0.9		
LIMITE LINEAR	600	Nº DE LEITURAS	4

AVANÇADAS

GAP AR INICIAL	2 µL
VELOCIDADE GAP INICIAL	500
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	2 µL
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	500
VEL. DE ASPIRAÇÃO R1+AMOSTRA	2500
R2 VEL. DESPENÇÃO	2500
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000

DILUIÇÃO COM:

AMOSTRA	
VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO	2 µL
VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA	500

LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA

LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA	0
MÉTODO	
LAVAGENS	

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

**CLORETO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>VOLUME (ML)</b>	<b>Nº. TESTES</b>
100/240-200	200	666

**GERAL**

NOME	CLORETO	MARCA	VIDA	TIPO	PONTO FINAL BRANCO DE REAGENTE		
C.O. PRIMÁRIO	505 NM	C.O. BICROMÁTICO	-	UNIDADE	mEq/L	DECIMAL	1

**DISPENSADO**

VOL. AMOSTRA	2 µL	R1 VOLUME	300 µL	R2 VOLUME	-	T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE	0 SEG
--------------	------	-----------	--------	-----------	---	----------------------------	-------

**ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE**

ABS. MIN.	-0.5	ABS. MÁX	2.5	INTERVALO DE VERIFICAÇÃO	#
-----------	------	----------	-----	--------------------------	---

**FATOR**

MÉTODO DECRESCENTE		CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR	*
FATOR		INTERPOLAÇÃO	LINEAR
X	CALIBRADOR		

**VALORES DE REFERÊNCIA**

#
---

**ESPECIAIS**

OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO	
T. BRANCO DE REAGENTE	300 SEG
T. INCUBAÇÃO	300 SEG
REPETIÇÃO	1.5

INTERVALOS DE BRANCO	72 H
----------------------	------

LIMITE LINEAR	150
---------------	-----

**AVANÇADAS**

GAP AR INICIAL	2 µL
VELOCIDADE GAP INICIAL	500
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	2 µL
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	500
VEL. DE ASPERAÇÃO R1+AMOSTRA	2500
R2 VEL. DESPENÇÃO	2500
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000

**DILUIÇÃO COM:**

AMOSTRA	
VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO	2 µL
VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA	500

**LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA**

LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA	0
MÉTODO	
LAVAGENS	

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

**Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.**

**Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.**

COLESTEROL HDL DIRETO

CÓDIGO.	VOLUME (ML)	Nº. TESTES
100/250-080	80	260
100/250-240	240	800

GERAL

NOME	HDL DIRETO	MARCA	VIDA	TIPO	PONTO FINAL BRANCO DE REAGENTE		
C.O. PRIMÁRIO	578 NM	C.O. BICROMÁTICO	-	UNIDADE	mg/dL	DECIMAL	1

DISPENSADO

VOL. AMOSTRA	3 µL	R1 VOLUME	225 µL	R2 VOLUME	75 µL	T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE	300 SEG
--------------	------	-----------	--------	-----------	-------	----------------------------	---------

ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE

ABS. MIN.	-0.5	ABS. MÁX	2.5	INTERVALO DE VERIFICAÇÃO	#
-----------	------	----------	-----	--------------------------	---

FATOR

MÉTODO DECRESCENTE		CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR	*
FATOR		INTERPOLAÇÃO	LINEAR
X	CALIBRADOR		

VALORES DE REFERÊNCIA

#
---

ESPECIAIS

OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO		INTERVALOS DE BRANCO	72 H
T. BRANCO DE REAGENTE	300 SEG	LIMITE LINEAR	150
T. INCUBAÇÃO	300 SEG		
REPETIÇÃO	1.5		

AVANÇADAS

GAP AR INICIAL	2 µL	DILUIÇÃO COM:		LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA	
VELOCIDADE GAP INICIAL	500	AMOSTRA		LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA	0
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	2 µL	VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO		MÉTODO	LAVAGENS
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	500	2 µL			
VEL. DE ASPERAÇÃO R1+AMOSTRA	2500	VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA			
R2 VEL. DESPENÇÃO	2500	500			
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000				
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000				

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

COLESTEROL ENZIMÁTICO

CÓDIGO.	VOLUME (ML)	Nº. TESTES
100/280-200	200	1000
100/280-500	500	2500

GERAL

NOME	COLESTEROL	MARCA	VIDA	TIPO	PONTO FINAL BRANCO DE REAGENTE		
C.O. PRIMÁRIO	505 NM	C.O. BICROMÁTICO	-	UNIDADE	mg/dL	DECIMAL	1

DISPENSADO

VOL. AMOSTRA	2 µL	R1 VOLUME	200 µL	R2 VOLUME	-	T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE	0 SEG
--------------	------	-----------	--------	-----------	---	----------------------------	-------

ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE

ABS. MIN.	-0.5	ABS. MÁX	2.5	INTERVALO DE VERIFICAÇÃO	#
-----------	------	----------	-----	--------------------------	---

FATOR

MÉTODO DECRESCENTE		CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR	*
FATOR		INTERPOLAÇÃO	LINEAR
X	CALIBRADOR		

VALORES DE REFERÊNCIA

#
---

ESPECIAIS

OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO	
T. BRANCO DE REAGENTE	300 SEG
T. INCUBAÇÃO	300 SEG
REPETIÇÃO	1.5

INTERVALOS DE BRANCO	72 H
----------------------	------

LIMITE LINEAR	800
---------------	-----

AVANÇADAS

GAP AR INICIAL	0 µL
VELOCIDADE GAP INICIAL	500
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	2 µL
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	500
VEL. DE ASPERAÇÃO R1+AMOSTRA	2500
R2 VEL. DESPENÇÃO	2500
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000

DILUIÇÃO COM:

AMOSTRA	
VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO	2 µL
VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA	500

LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA

LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA	0
MÉTODO	
LAVAGENS	

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

**CREATININA CINETICA**

CÓDIGO	VOLUME (ML)	Nº. TESTES
100/300-250	250	1250

**GERAL**

NOME	MARCA	TIPO
CREATININA CINETICA	VIDA	CINÉTICA DE TEMPO FIXO
C.O. PRIMÁRIO	505 NM	C.O. BICROMÁTICO
	-	UNIDADE
		mg/dL
		DECIMAL
		2

**DISPENSADO**

VOL. AMOSTRA	20 µL	R1 VOLUME	160 µL	R2 VOLUME	40 µL	T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE	0
--------------	-------	-----------	--------	-----------	-------	----------------------------	---

**ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE**

ABS. MIN.	-0.5	ABS. MÁX	2.5	INTERVALO DE VERIFICAÇÃO	#
-----------	------	----------	-----	--------------------------	---

**FATOR**

MÉTODO DECRESCENTE	CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR	*
FATOR	INTERPOLAÇÃO	LINEAR
X CALIBRADOR		

**VALORES DE REFERÊNCIA**

#
---

**ESPECIAIS**

**OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO**

T. INICIAL DA LEITURA	30 SEG
CONSUMO INICIAL	0.22
REPETIÇÃO	1.5

T. FINAL DA LEITURA	120 SEG
LINEARIDADE	0.9
LIMITE LINEAR	10

T. BDT	20
--------	----

**AVANÇADAS**

GAP AR INICIAL	2 µL
VELOCIDADE GAP INICIAL	500
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	2 µL
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	500
VEL. DE ASPERAÇÃO R1+AMOSTRA	2500
R2 VEL. DESPENÇÃO	2500
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000

**DILUIÇÃO COM:**

AMOSTRA
VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO
2 µL
VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA
500

**LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA**

LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA	0
MÉTODO	LAVAGENS

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

**Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.**

**Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.**

**DESIDROGENASE LÁTICA - LDH**

<b>CÓDIGO</b>	<b>VOLUME (ML)</b>	<b>Nº. TESTES</b>
100/470-100	100	500

**GERAL**

NOME	MARCA	TIPO
LDH	VIDA	CINÉTICA
C.O. PRIMÁRIO	C.O. BICROMÁTICO	UNIDADE
340 NM	-	U/L
		DECIMAL
		1

**DISPENSADO**

VOL. AMOSTRA	R1 VOLUME	R2 VOLUME	T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE
4 µL	160 µL	40 µL	0 SEG

**ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE**

ABS. MIN.	ABS. MÁX	INTERVALO DE VERIFICAÇÃO
-0.5	2.5	#

**FATOR**

<input checked="" type="checkbox"/>	MÉTODO DECRESCENTE	CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR
<input type="checkbox"/>	FATOR	*
<input checked="" type="checkbox"/>	CALIBRADOR	INTERPOLAÇÃO
		LINEAR

**VALORES DE REFERÊNCIA**

#
---

**ESPECIAIS**

**OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO**

T. INICIAL DA LEITURA	60 SEG	T. FINAL DA LEITURA	180 SEG	T. TDB	20
CONSUMO INICIAL	0.22	LINEARIDADE	0.9		
REPETIÇÃO	1.5	LIMITE LINEAR	2000	Nº DE LEITURAS	4

**AVANÇADAS**

GAP AR INICIAL	2 µL
VELOCIDADE GAP INICIAL	500
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	2 µL
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	500
VEL. DE ASPERAÇÃO R1+AMOSTRA	2500
R2 VEL. DESPENÇÃO	2500
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000

**DILUIÇÃO COM:**

AMOSTRA
VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO
2 µL
VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA
500

**LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA**

LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA	0
MÉTODO	LAVAGENS

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

**Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.**

**Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.**

FERRITINA

CÓDIGO	VOLUME (ML)	Nº. TESTES
700/170-050	050	250

GERAL

NOME	MARCA	TIPO
FERRITINA	VIDA	CINÉTICA TEMPO FIXO
C.O. PRIMÁRIO	546 NM	C.O. BICROMÁTICO
		-
UNIDADE	µg/L	DECIMAL
		1

DISPENSADO

VOL. AMOSTRA	18 µL	R1 VOLUME	160 µL	R2 VOLUME	40	T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE	0 SEG
--------------	-------	-----------	--------	-----------	----	----------------------------	-------

ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE

ABS. MIN.	0	ABS. MÁX	2.5	INTERVALO DE VERIFICAÇÃO	#
-----------	---	----------	-----	--------------------------	---

FATOR

MÉTODO DECRESCENTE	CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR	*
FATOR	INTERPOLAÇÃO	Logit-log5
X	CALIBRADOR	

VALORES DE REFERÊNCIA

#
---

ESPECIAIS

OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO		INTERVALOS DE BRANCO	72 H
T. BRANCO DE REAGENTE	30 SEG	LIMITE LINEAR	600
T. INCUBAÇÃO	300 SEG		
REPETIÇÃO	0.2		

AVANÇADAS

GAP AR INICIAL	0 µL	DILUIÇÃO COM:	AMOSTRA	LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA	
VELOCIDADE GAP INICIAL	500			LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA	0
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	2 µL	VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO	2 µL		
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	500				
VEL. DE ASPERAÇÃO R1+AMOSTRA	2500	VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA	500		
R2 VEL. DESPENÇÃO	2500				
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000				
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000				

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.



**FERRO CROMAZUROL**

CÓDIGO	VOLUME (ML)	Nº. TESTES
100/330-050	50	250

**GERAL**

NOME FERRO CROMAZUOL	MARCA VIDA	TIPO PONTO FINAL BRANCO DE REAGENTE
C.O. PRIMÁRIO 650 NM	C.O. BICROMÁTICO -	UNIDADE mg/dL
		DECIMAL 1

**DISPENSADO**

VOL. AMOSTRA 10 µL	R1 VOLUME 200 µL	R2 VOLUME -	T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE 0 SEG
-----------------------	---------------------	----------------	-------------------------------------

**ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE**

ABS. MIN. -0.5	ABS. MÁX 2.5	INTERVALO DE VERIFICAÇÃO #
-------------------	-----------------	-------------------------------

**FATOR**

MÉTODO DECRESCENTE	CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR *
FATOR	INTERPOLAÇÃO LINEAR
X CALIBRADOR	

**VALORES DE REFERÊNCIA**

#
---

**ESPECIAIS**

OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO

T. BRANCO DE REAGENTE	300 SEG
T. INCUBAÇÃO	300 SEG
REPETIÇÃO	1.5

INTERVALOS DE BRANCO	72 H
----------------------	------

LIMITE LINEAR	500
---------------	-----

**AVANÇADAS**

GAP AR INICIAL	2 µL
VELOCIDADE GAP INICIAL	500
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	2 µL
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	500
VEL. DE ASPERAÇÃO R1+AMOSTRA	2500
R2 VEL. DESPENÇÃO	2500
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000

DILUIÇÃO COM:

AMOSTRA
VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO 2 µL
VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA 500

**LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA**

LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA	3
MÉTODO	LAVAGENS

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

**Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.**

**Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.**

**FOSTATASE ALCALINA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>VOLUME (ML)</b>	<b>Nº. TESTES</b>
100/360-100	100	500

**GERAL**

NOME	MARCA	TIPO
FOSF. ALC	VIDA	CINÉTICA
C.O. PRIMÁRIO	C.O. BICROMÁTICO	UNIDADE
405 NM	-	U/L
		DECIMAL
		1

**DISPENSADO**

VOL. AMOSTRA	R1 VOLUME	R2 VOLUME	T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE
4 µL	160 µL	40 µL	0

**ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE**

ABS. MIN.	ABS. MÁX	INTERVALO DE VERIFICAÇÃO
-0.5	2.5	#

**FATOR**

MÉTODO DECRESCENTE	CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR
FATOR	*
X CALIBRADOR	INTERPOLAÇÃO
	LINEAR

**VALORES DE REFERÊNCIA**

#
---

**ESPECIAIS**

**OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO**

T. INICIAL DA LEITURA	60 SEG
CONSUMO INICIAL	0.22
REPETIÇÃO	1.5

T. FINAL DA LEITURA	180 SEG	T. BDT	20
LINEARIDADE	0.9		
LIMITE LINEAR	700	Nº DE LEITURAS	4

**AVANÇADAS**

GAP AR INICIAL	2 µL
VELOCIDADE GAP INICIAL	500
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	2 µL
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	500
VEL. DE ASPERAÇÃO R1+AMOSTRA	2500
R2 VEL. DESPENÇÃO	2500
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000

**DILUIÇÃO COM:**

AMOSTRA
VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO
2 µL
VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA
500

**LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA**

LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA	0
MÉTODO	LAVAGENS

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

**Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.**

**Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.**

FÓSFORO U.V.

CÓDIGO	VOLUME (ML)	Nº. TESTES
100/380-200	200	1000

GERAL

NOME	POSFORO	MARCA	VIDA	TIPO	PONTO FINAL BRANCO DE REAGENTE		
C.O. PRIMÁRIO	340 NM	C.O. BICROMÁTICO	-	UNIDADE	mg/dL	DECIMAL	1

DISPENSADO

VOL. AMOSTRA	2 µL	R1 VOLUME	200 µL	R2 VOLUME	-	T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE	0
--------------	------	-----------	--------	-----------	---	----------------------------	---

ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE

ABS. MIN.	-0.5	ABS. MÁX	2.5	INTERVALO DE VERIFICAÇÃO	#
-----------	------	----------	-----	--------------------------	---

FATOR

MÉTODO DECRESCENTE	CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR	*
FATOR	INTERPOLAÇÃO	LINEAR
X	CALIBRADOR	

VALORES DE REFERÊNCIA

#
---

ESPECIAIS

OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO		INTERVALOS DE BRANCO	72 H
T. BRANCO DE REAGENTE	120 SEG	LIMITE LINEAR	30
T. INCUBAÇÃO	120 SEG		
REPETIÇÃO	1.5		

AVANÇADAS

GAP AR INICIAL	2 µL	DILUIÇÃO COM:	AMOSTRA	LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA	0
VELOCIDADE GAP INICIAL	500			LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA	0
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	2 µL	VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO	2 µL	MÉTODO	LAVAGENS
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	500				
VEL. DE ASPIRAÇÃO R1+AMOSTRA	2500	VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA	500		
R2 VEL. DESPENÇÃO	2500				
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000				
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000				

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

**FRUTOSAMINA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>VOLUME (ML)</b>	<b>Nº. TESTES</b>
100/390-100	100	500

**GERAL**

NOME	MARCA	TIPO
FRUTOSAMINA	VIDA	CINÉTICA DE TEMPO FIXO
C.O. PRIMÁRIO	C.O. BICROMÁTICO	UNIDADE
546 NM	-	µMOL/L
		DECIMAL
		1

**DISPENSADO**

VOL. AMOSTRA	R1 VOLUME	R2 VOLUME	T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE
10 µL	200 µL	-	0

**ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE**

ABS. MIN.	ABS. MÁX	INTERVALO DE VERIFICAÇÃO
-0.5	2.5	#

**FATOR**

MÉTODO DECRESCENTE	CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR
FATOR	*
X CALIBRADOR	INTERPOLAÇÃO
	LINEAR

**VALORES DE REFERÊNCIA**

#
---

**ESPECIAIS**

**OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO**

T. INICIAL DA LEITURA	300 SEG	T. FINAL DA LEITURA	900 SEG	T. BDT	20
CONSUMO INICIAL	0.22	LINEARIDADE	0.9		
REPETIÇÃO	1.5	LIMITE LINEAR	800		

**AVANÇADAS**

GAP AR INICIAL	2 µL	DILUIÇÃO COM:		LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA	
VELOCIDADE GAP INICIAL	500	AMOSTRA		LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA	0
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	2 µL	VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO		MÉTODO	LAVAGENS
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	500	2 µL			
VEL. DE ASPERAÇÃO R1+AMOSTRA	2500	VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA			
R2 VEL. DESPENÇÃO	2500	500			
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000				
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000				

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

**Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.**

**Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.**

FR TURBIDIMÉTRICO

CÓDIGO	VOLUME (ML)	Nº. TESTES
700/220-050	050	166

GERAL

NOME	MARCA	TIPO
FR TURBI	VIDA	CINÉTICA TEMPO FIXO
C.O. PRIMÁRIO	620 NM	C.O. BICROMÁTICO
		-
UNIDADE	UI/mL	DECIMAL
		1

DISPENSADO

VOL. AMOSTRA	2.0 µL	R1 VOLUME	240 µL	R2 VOLUME	60	T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE	0 SEG
--------------	--------	-----------	--------	-----------	----	----------------------------	-------

ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE

ABS. MIN.	0	ABS. MÁX	2.5	INTERVALO DE VERIFICAÇÃO	#
-----------	---	----------	-----	--------------------------	---

FATOR

MÉTODO DECRESCENTE	CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR	*
FATOR	INTERPOLAÇÃO	Logit-log5
X	CALIBRADOR	

VALORES DE REFERÊNCIA

#
---

ESPECIAIS

OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO		INTERVALOS DE BRANCO	72 H
T. BRANCO DE REAGENTE	30 SEG	LIMITE LINEAR	160
T. INCUBAÇÃO	120 SEG		
REPETIÇÃO	0.2		

AVANÇADAS

GAP AR INICIAL	0 µL	DILUIÇÃO COM:	AMOSTRA	LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA	
VELOCIDADE GAP INICIAL	500			LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA	0
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	2 µL	VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO	2 µL		
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	500				
VEL. DE ASPIRAÇÃO R1+AMOSTRA	2500	VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA	500		
R2 VEL. DESPENÇÃO	2500				
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000				
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000				

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

**GAMA GT**

<b>CÓDIGO</b>	<b>VOLUME (ML)</b>	<b>Nº. TESTES</b>
100/400-100	100	500

**GERAL**

NOME	GGT	MARCA	VIDA	TIPO	CINÉTICA		
C.O. PRIMÁRIO	405 NM	C.O. BICROMÁTICO	-	UNIDADE	U/L	DECIMAL	1

**DISPENSADO**

VOL. AMOSTRA	20 µL	R1 VOLUME	160 µL	R2 VOLUME	40 µL	T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE	0 SEG
--------------	-------	-----------	--------	-----------	-------	----------------------------	-------

**ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE**

ABS. MIN.	-0.5	ABS. MÁX	2.5	INTERVALO DE VERIFICAÇÃO	#
-----------	------	----------	-----	--------------------------	---

**FATOR**

MÉTODO DECRESCENTE		CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR	*
FATOR		INTERPOLAÇÃO	LINEAR
X CALIBRADOR			

**VALORES DE REFERÊNCIA**

#
---

**ESPECIAIS**

**OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO**

T. INICIAL DA LEITURA	60 SEG	T. FINAL DA LEITURA	180 SEG	T. TDB	20
CONSUMO INICIAL	0.22	LINEARIDADE	0.9	Nº DE LEITURAS	4
REPETIÇÃO	1.5	LIMITE LINEAR	250		

**AVANÇADAS**

GAP AR INICIAL	2 µL
VELOCIDADE GAP INICIAL	500
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	2 µL
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	500
VEL. DE ASPERAÇÃO R1+AMOSTRA	2500
R2 VEL. DESPENÇÃO	2500
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000

**DILUIÇÃO COM:**

AMOSTRA	
VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO	2 µL
VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA	500

**LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA**

LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA	0
---------------------------------	---

MÉTODO	LAVAGENS

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

**Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.**

**Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.**

**GLICOSE**

CÓDIGO	VOLUME (ML)	Nº. TESTES
100/410-500	500	2500
100/410-1000	1000	5000

**GERAL**

NOME  MARCA  TIPO

C.O. PRIMÁRIO  C.O. BICROMÁTICO  UNIDADE  DECIMAL

**DISPENSADO**

VOL. AMOSTRA  R1 VOLUME  R2 VOLUME  T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE

**ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE**

ABS. MIN.  ABS. MÁX  INTERVALO DE VERIFICAÇÃO

**FATOR**

<input type="text" value="MÉTODO DECRESCENTE"/>	<input type="text" value="CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR"/>	<input type="text" value="*"/>
<input type="text" value="FATOR"/>	<input type="text" value="INTERPOLAÇÃO"/>	<input type="text" value="LINEAR"/>
<input type="text" value="X"/>	<input type="text" value="CALIBRADOR"/>	

**VALORES DE REFERÊNCIA**

**ESPECIAIS**

OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO

T. BRANCO DE REAGENTE	<input type="text" value="600 SEG"/>
T. INCUBAÇÃO	<input type="text" value="600 SEG"/>
REPETIÇÃO	<input type="text" value="1.5"/>

INTERVALOS DE BRANCO

LIMITE LINEAR

**AVANÇADAS**

GAP AR INICIAL	<input type="text" value="2 µL"/>
VELOCIDADE GAP INICIAL	<input type="text" value="500"/>
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	<input type="text" value="2 µL"/>
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	<input type="text" value="500"/>
VEL. DE ASPIRAÇÃO R1+AMOSTRA	<input type="text" value="2500"/>
R2 VEL. DESPENÇÃO	<input type="text" value="2500"/>
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	<input type="text" value="2000"/>
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	<input type="text" value="2000"/>

DILUIÇÃO COM:

<input type="text" value="AMOSTRA"/>	
VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO	<input type="text" value="2 µL"/>
VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA	<input type="text" value="500"/>

**LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA**

LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA

MÉTODO	LAVAGENS
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

**Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.**

**Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.**

**LACTATO ENZIMÁTICO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>VOLUME (ML)</b>	<b>Nº. TESTES</b>
100/460-100	100	500

**GERAL**

NOME	MARCA	TIPO
LACTATO	VIDA	PONTO FINAL BRANCO DE REAGENTE
C.O. PRIMÁRIO	546 NM	C.O. BICROMÁTICO
	-	UNIDADE
		mg/dL
		DECIMAL
		2

**DISPENSADO**

VOL. AMOSTRA	2 µL	R1 VOLUME	200 µL	R2 VOLUME	-	T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE	0 SEG
--------------	------	-----------	--------	-----------	---	----------------------------	-------

**ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE**

ABS. MIN.	-0.5	ABS. MÁX	2.5	INTERVALO DE VERIFICAÇÃO	#
-----------	------	----------	-----	--------------------------	---

**FATOR**

MÉTODO DECRESCENTE	CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR	*
FATOR	INTERPOLAÇÃO	LINEAR
X	CALIBRADOR	

**VALORES DE REFERÊNCIA**

#
---

**ESPECIAIS**

OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO		INTERVALOS DE BRANCO	72 H
T. BRANCO DE REAGENTE	300 SEG	LIMITE LINEAR	120
T. INCUBAÇÃO	300 SEG		
REPETIÇÃO	1.5		

**AVANÇADAS**

GAP AR INICIAL	2 µL	DILUIÇÃO COM:		LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA	
VELOCIDADE GAP INICIAL	500	AMOSTRA		LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA	0
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	2 µL	VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO	2 µL	MÉTODO	LAVAGENS
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	500	VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA	500		
VEL. DE ASPERAÇÃO R1+AMOSTRA	2500				
R2 VEL. DESPENÇÃO	2500				
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000				
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000				

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

**Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.**

**Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.**



**LIPASE DIRETA**

CÓDIGO	VOLUME (ML)	Nº. TESTES
100/490-050	50	250

**GERAL**

NOME	MARCA	TIPO
LIPASE	VIDA	CINÉTICA DE TEMPO FIXO
C.O. PRIMÁRIO	578 NM	C.O. BICROMÁTICO
		-
		UNIDADE
		U/L
		DECIMAL
		1

**DISPENSADO**

VOL. AMOSTRA	2 µL	R1 VOLUME	160 µL	R2 VOLUME	40 µL	T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE	0
--------------	------	-----------	--------	-----------	-------	----------------------------	---

**ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE**

ABS. MIN.	-0.5	ABS. MÁX	2.5	INTERVALO DE VERIFICAÇÃO	#
-----------	------	----------	-----	--------------------------	---

**FATOR**

MÉTODO DECRESCENTE	CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR	*
FATOR	INTERPOLAÇÃO	LINEAR
X	CALIBRADOR	

**VALORES DE REFERÊNCIA**

#
---

**ESPECIAIS**

OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO	T. INICIAL DA LEITURA	120 SEG	T. FINAL DA LEITURA	120 SEG	T. BDT	20
	CONSUMO INICIAL	0.22	LINEARIDADE	0.9		
	REPETIÇÃO	1.5	LIMITE LINEAR	300		

**AVANÇADAS**

GAP AR INICIAL	2 µL
VELOCIDADE GAP INICIAL	500
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	2 µL
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	500
VEL. DE ASPERAÇÃO R1+AMOSTRA	2500
R2 VEL. DESPENÇÃO	2500
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000

**DILUIÇÃO COM:**

AMOSTRA
VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO
2 µL
VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA
500

**LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA**

LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA	0
MÉTODO	LAVAGENS

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

**Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.**

**Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.**

**MAGNÉSIO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>VOLUME (ML)</b>	<b>Nº. TESTES</b>
100/500-100	100	500

**GERAL**

NOME	MARCA	TIPO
MAGNÉSIO	VIDA	PONTO FINAL BRANCO DE REAGENTE
C.O. PRIMÁRIO	C.O. BICROMÁTICO	UNIDADE
505 NM	-	mg/dL
		DECIMAL
		1

**DISPENSADO**

VOL. AMOSTRA	R1 VOLUME	R2 VOLUME	T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE
2 µL	200 µL	-	0 SEG

**ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE**

ABS. MIN.	ABS. MÁX	INTERVALO DE VERIFICAÇÃO
-0.5	2.5	#

**FATOR**

MÉTODO DECRESCENTE	CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR
FATOR	*
CALIBRADOR	INTERPOLAÇÃO
X	LINEAR

**VALORES DE REFERÊNCIA**

#
---

**ESPECIAIS**

OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO	INTERVALOS DE BRANCO
T. BRANCO DE REAGENTE	600 SEG
T. INCUBAÇÃO	600 SEG
REPETIÇÃO	1.5
	LIMITE LINEAR
	3.5

**AVANÇADAS**

GAP AR INICIAL	2 µL	DILUIÇÃO COM:	LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA
VELOCIDADE GAP INICIAL	500	AMOSTRA	LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	2 µL		0
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	500	VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO	
VEL. DE ASPIRAÇÃO R1+AMOSTRA	2500	2 µL	
R2 VEL. DESPENÇÃO	2500		
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000	VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA	
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000	500	

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

**Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.**

**Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.**

**PCR TURBIDIMÉTRICO**

CÓDIGO	VOLUME (ML)	Nº. TESTES
700/220-050	050	166
700/220-100	100	333

**GERAL**

NOME	MARCA	TIPO
PCR TURBI	VIDA	CINÉTICA TEMPO FIXO
C.O. PRIMÁRIO	546 NM	C.O. BICROMÁTICO
	-	UNIDADE
		mg/L
		DECIMAL
		1

**DISPENSADO**

VOL. AMOSTRA	2 µL	R1 VOLUME	240 µL	R2 VOLUME	60	T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE	0 SEG
--------------	------	-----------	--------	-----------	----	----------------------------	-------

**ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE**

ABS. MIN.	0	ABS. MÁX	2.5	INTERVALO DE VERIFICAÇÃO	#
-----------	---	----------	-----	--------------------------	---

**FATOR**

MÉTODO DECRESCENTE	CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR	*
FATOR	INTERPOLAÇÃO	LINEAR
X	CALIBRADOR	

**VALORES DE REFERÊNCIA**

#
---

**ESPECIAIS**

OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO

T. BRANCO DE REAGENTE	30 SEG
T. INCUBAÇÃO	120 SEG
REPETIÇÃO	0.2

INTERVALOS DE BRANCO	72 H
----------------------	------

LIMITE LINEAR	150
---------------	-----

**AVANÇADAS**

GAP AR INICIAL	0 µL
VELOCIDADE GAP INICIAL	500
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	2 µL
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	500
VEL. DE ASPERAÇÃO R1+AMOSTRA	2500
R2 VEL. DESPENÇÃO	2500
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000

DILUIÇÃO COM:

AMOSTRA	
VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO	2 µL
VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA	500

**LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA**

LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA	0
MÉTODO	LAVAGENS

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

**Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.**

**Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.**

PCR<sub>u</sub> TURBIDIMÉTRICO

CÓDIGO	VOLUME (ML)	Nº. TESTES
700/220-050	050	250

GERAL

NOME  MARCA  TIPO

C.O. PRIMÁRIO  C.O. BICROMÁTICO  UNIDADE  DECIMAL

DISPENSADO

VOL. AMOSTRA  R1 VOLUME  R2 VOLUME  T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE

ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE

ABS. MIN.  ABS. MÁX  INTERVALO DE VERIFICAÇÃO

FATOR

	MÉTODO DECRESCENTE	CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR	<input type="text" value="*"/>
	FATOR		
X	CALIBRADOR	INTERPOLAÇÃO	<input type="text" value="LINEAR"/>

VALORES DE REFERÊNCIA

ESPECIAIS

OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO

T. BRANCO DE REAGENTE	<input type="text" value="30 SEG"/>	INTERVALOS DE BRANCO	<input type="text" value="72 H"/>
T. INCUBAÇÃO	<input type="text" value="240 SEG"/>		
REPETIÇÃO	<input type="text" value="0.2"/>	LIMITE LINEAR	<input type="text" value="10"/>

AVANÇADAS

GAP AR INICIAL	<input type="text" value="0 µL"/>	DILUIÇÃO COM:	<input type="text" value="AMOSTRA"/>	LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA	<input type="text" value="0"/>
VELOCIDADE GAP INICIAL	<input type="text" value="500"/>			LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA	<input type="text" value="0"/>
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	<input type="text" value="2 µL"/>				
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	<input type="text" value="500"/>	VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO	<input type="text" value="2 µL"/>		
VEL. DE ASPERAÇÃO R1+AMOSTRA	<input type="text" value="2500"/>				
R2 VEL. DESPENÇÃO	<input type="text" value="2500"/>				
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	<input type="text" value="2000"/>	VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA	<input type="text" value="500"/>		
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	<input type="text" value="2000"/>				

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

**PROTEÍNAS TOTAIS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>VOLUME (ML)</b>	<b>Nº. TESTES</b>
100/530-250	250	1250

**GERAL**

NOME	MARCA	TIPO
PROTEINAS TOTAIS	VIDA	PONTO FINAL BRANCO DE REAGENTE
C.O. PRIMÁRIO	546 NM	C.O. BICROMÁTICO
	-	UNIDADE
		mg/dL
		DECIMAL
		1

**DISPENSADO**

VOL. AMOSTRA	2 µL	R1 VOLUME	200 µL	R2 VOLUME	-	T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE	0 SEG
--------------	------	-----------	--------	-----------	---	----------------------------	-------

**ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE**

ABS. MIN.	-0.5	ABS. MÁX	2.5	INTERVALO DE VERIFICAÇÃO	#
-----------	------	----------	-----	--------------------------	---

**FATOR**

MÉTODO DECRESCENTE	CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR	*
FATOR	INTERPOLAÇÃO	LINEAR
X	CALIBRADOR	

**VALORES DE REFERÊNCIA**

#
---

**ESPECIAIS**

OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO		INTERVALOS DE BRANCO	72 H
T. BRANCO DE REAGENTE	300 SEG	LIMITE LINEAR	12
T. INCUBAÇÃO	300 SEG		
REPETIÇÃO	1.5		

**AVANÇADAS**

GAP AR INICIAL	2 µL	DILUIÇÃO COM:		LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA	
VELOCIDADE GAP INICIAL	500	AMOSTRA		LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA	0
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	2 µL	VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO	2 µL	MÉTODO	LAVAGENS
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	500	VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA	500		
VEL. DE ASPERAÇÃO R1+AMOSTRA	2500				
R2 VEL. DESPENÇÃO	2500				
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000				
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000				

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

**Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.**

**Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.**

**PROTEÍNA URINÁRIA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>VOLUME (ML)</b>	<b>Nº. TESTES</b>
100/540-100	100	500

**GERAL**

NOME	MARCA	TIPO
PROTEÍNA URINÁRIA	VIDA	PONTO FINAL BRANCO DE REAGENTE
C.O. PRIMÁRIO	C.O. BICROMÁTICO	UNIDADE
600 NM	-	mg/L
		DECIMAL
		2

**DISPENSADO**

VOL. AMOSTRA	R1 VOLUME	R2 VOLUME	T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE
4 µL	200 µL	-	0 SEG

**ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE**

ABS. MIN.	ABS. MÁX	INTERVALO DE VERIFICAÇÃO
-0.5	2.5	#

**FATOR**

MÉTODO DECRESCENTE	CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR
FATOR	*
CALIBRADOR	INTERPOLAÇÃO
X	LINEAR

**VALORES DE REFERÊNCIA**

#
---

**ESPECIAIS**

OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO	INTERVALOS DE BRANCO
T. BRANCO DE REAGENTE	300 SEG
T. INCUBAÇÃO	300 SEG
REPETIÇÃO	1.5
	LIMITE LINEAR
	3000

**AVANÇADAS**

GAP AR INICIAL	2 µL	DILUIÇÃO COM:	LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA
VELOCIDADE GAP INICIAL	500	AMOSTRA	LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	2 µL		0
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	500	VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO	
VEL. DE ASPIRAÇÃO R1+AMOSTRA	2500	2 µL	
R2 VEL. DESPENÇÃO	2500		
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000	VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA	
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000	500	

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

**Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.**

**Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.**

**TGO CINÉTICO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>VOLUME (ML)</b>	<b>Nº. TESTES</b>
100/420-100	100	500

**GERAL**

NOME	MARCA	TIPO
TGO	VIDA	CINÉTICA
C.O. PRIMÁRIO	C.O. BICROMÁTICO	UNIDADE
340 NM	-	U/L
		DECIMAL
		1

**DISPENSADO**

VOL. AMOSTRA	R1 VOLUME	R2 VOLUME	T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE
20 µL	160 µL	40 µL	0 SEG

**ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE**

ABS. MIN.	ABS. MÁX	INTERVALO DE VERIFICAÇÃO
-0.5	2.5	#

**FATOR**

<input checked="" type="checkbox"/>	MÉTODO DECRESCENTE	CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR
<input type="checkbox"/>	FATOR	*
<input checked="" type="checkbox"/>	CALIBRADOR	INTERPOLAÇÃO
		LINEAR

**VALORES DE REFERÊNCIA**

#
---

**ESPECIAIS**

**OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO**

T. INICIAL DA LEITURA	60 SEG	T. FINAL DA LEITURA	180 SEG	T. BDT	20
CONSUMO INICIAL	0.22	LINEARIDADE	0.9		
REPETIÇÃO	1.5	LIMITE LINEAR	440	Nº DE LEITURAS	4

**AVANÇADAS**

GAP AR INICIAL	2 µL
VELOCIDADE GAP INICIAL	500
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	2 µL
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	500
VEL. DE ASPERAÇÃO R1+AMOSTRA	2500
R2 VEL. DESPENÇÃO	2500
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000

**DILUIÇÃO COM:**

AMOSTRA
VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO
2 µL
VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA
500

**LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA**

LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA	0
---------------------------------	---

MÉTODO	LAVAGENS

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

**Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.**

**Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.**

**TGP CINÉTICO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>VOLUME (ML)</b>	<b>Nº. TESTES</b>
100/430-100	100	500

**GERAL**

NOME	MARCA	TIPO
TGP	VIDA	CINÉTICA
C.O. PRIMÁRIO	C.O. BICROMÁTICO	UNIDADE
340 NM	-	U/L
		DECIMAL
		1

**DISPENSADO**

VOL. AMOSTRA	R1 VOLUME	R2 VOLUME	T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE
20 µL	160 µL	40 µL	0 SEG

**ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE**

ABS. MIN.	ABS. MÁX	INTERVALO DE VERIFICAÇÃO
-0.5	2.5	#

**FATOR**

<input checked="" type="checkbox"/>	MÉTODO DECRESCENTE	CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR
<input type="checkbox"/>	FATOR	*
<input checked="" type="checkbox"/>	CALIBRADOR	INTERPOLAÇÃO
		LINEAR

**VALORES DE REFERÊNCIA**

#
---

**ESPECIAIS**

**OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO**

T. INICIAL DA LEITURA	60 SEG	T. FINAL DA LEITURA	180 SEG	T. BDT	20
CONSUMO INICIAL	0.22	LINEARIDADE	0.9		
REPETIÇÃO	1.5	LIMITE LINEAR	350	Nº DE LEITURAS	4

**AVANÇADAS**

GAP AR INICIAL	2 µL
VELOCIDADE GAP INICIAL	500
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	2 µL
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	500
VEL. DE ASPERAÇÃO R1+AMOSTRA	2500
R2 VEL. DESPENÇÃO	2500
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000

**DILUIÇÃO COM:**

AMOSTRA
VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO
2 µL
VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA
500

**LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA**

LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA	0
---------------------------------	---

MÉTODO	LAVAGENS

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

**Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.**

**Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.**



TRIGLICÉRIDES ENZIMÁTICO

CÓDIGO.	VOLUME (ML)	Nº. TESTES
100/610-100	100	500
100/610-200	250	1250
100/610-400	500	2500

GERAL

NOME	MARCA	TIPO
TRIGLICÉRIDES	VIDA	PONTO FINAL BRANCO DE REAGENTE
C.O. PRIMÁRIO	C.O. BICROMÁTICO	UNIDADE
505 NM	-	mg/dL
		DECIMAL
		1

DISPENSADO

VOL. AMOSTRA	R1 VOLUME	R2 VOLUME	T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE
2 µL	200 µL	-	0

ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE

ABS. MÍN.	ABS. MÁX	INTERVALO DE VERIFICAÇÃO
-0.5	2.5	#

FATOR

MÉTODO DECRESCENTE	CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR
FATOR	*
X	INTERPOLAÇÃO
CALIBRADOR	LINEAR

VALORES DE REFERÊNCIA

#
---

ESPECIAIS

OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO
T. BRANCO DE REAGENTE
T. INCUBAÇÃO
REPETIÇÃO

300 SEG
300 SEG
1.5

INTERVALOS DE BRANCO	72 H
----------------------	------

LIMITE LINEAR	1100
---------------	------

AVANÇADAS

GAP AR INICIAL	0 µL
VELOCIDADE GAP INICIAL	500
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	2 µL
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	500
VEL. DE ASPERAÇÃO R1+AMOSTRA	2500
R2 VEL. DESPENÇÃO	2500
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000

DILUIÇÃO COM:

AMOSTRA
VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO
2 µL
VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA
500

LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA

LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA	0
MÉTODO	LAVAGENS

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.

Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

**URÉIA UV**

CÓDIGO	VOLUME (ML)	Nº. TESTES
100/630-200	200	1000

**GERAL**

NOME	UREIA UV	MARCA	VIDA	TIPO	CINÉTICA DE TEMPO FIXO		
C.O. PRIMÁRIO	340 NM	C.O. BICROMÁTICO	-	UNIDADE	mg/dL	DECIMAL	1

**DISPENSADO**

VOL. AMOSTRA	2 µL	R1 VOLUME	160 µL	R2 VOLUME	40 µL	T. DISPENSAÇÃO DE REAGENTE	0
--------------	------	-----------	--------	-----------	-------	----------------------------	---

**ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO DO REAGENTE**

ABS. MIN.	-0.5	ABS. MÁX	2.5	INTERVALO DE VERIFICAÇÃO	#
-----------	------	----------	-----	--------------------------	---

**FATOR**

<input checked="" type="checkbox"/>	MÉTODO DECRESCENTE	CONCENTRAÇÃO CALIBRADOR	*
<input type="checkbox"/>	FATOR		
<input checked="" type="checkbox"/>	CALIBRADOR	INTERPOLAÇÃO	LINEAR

**VALORES DE REFERÊNCIA**

#
---

**ESPECIAIS**

OPÇÕES DO TIPO DE MÉTODO			
T. INICIAL DA LEITURA	30 SEG	T. FINAL DA LEITURA	120 SEG
CONSUMO INICIAL	0.22	LINEARIDADE	0.9
REPETIÇÃO	1.5	LIMITE LINEAR	300
		T. BDT	20

**AVANÇADAS**

GAP AR INICIAL	2 µL
VELOCIDADE GAP INICIAL	500
GAP SEPARAÇÃO REAG/AMOSTRA	2 µL
VEL. GAP. SEP. REAG/AMOSTRA	500
VEL. DE ASPERAÇÃO R1+AMOSTRA	2500
R2 VEL. DESPENÇÃO	2500
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000
R1 VEL. ASPIRAÇÃO	2000

**DILUIÇÃO COM:**

AMOSTRA	
VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO	2 µL
VOL. DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA	500

**LAVAGEM PARA EVITAR INTERFERÊNCIA**

LAVAGENS POR AUTO INTERFERÊNCIA	0
MÉTODO	LAVAGENS

# Valores inseridos pelo operador

\* Inserir os valores do padrão ou do calibrador

\*\* Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.

**Todos os dados desta programação deverão ser validados pelo laboratório.**

**Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.**